



INSTRUÇÕES DE USO

ABRIDOR DE BOCA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto para auxiliar na abertura da boca do paciente para procedimentos odontológicos.

2. APRESENTAÇÃO

Abridor de Boca P (Infantil), M (Adolescente) e G(Adulto), embalados com 1, 2, 10, 50 ou 100 unidade.

3. COMPOSIÇÃO

Silicone.

4. INDICAÇÃO DE USO

É indicada para uso odontológico para manter a boca do paciente aberta para facilitando o procedimento odontológico.

5. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

Manter o produto em local seco, limpo, arejado e temperatura ambiente.

6. INSTRUÇÕES PARA USO

- Selecionar o Abridor de Boca com o tamanho mais adequado para o seu paciente;
- Coloque-o entre os dentes, de modo que o paciente morda a lateral serrilhada e mantenha a boca aberta para realização dos procedimentos odontológicos;
- Após o uso, o abridor deve ser limpo com sabão enzimático em cuba ultrassônica e, em seguida, esterilizado.

7. CONTRA INDICAÇÕES

Não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade ao silicone.

8. ADVERTÊNCIAS

O Abridor de Boca não é estéril e deve ser esterilizado antes de cada uso. A esterilização deve ser feita em autoclave a 121°C por 30 minutos. O produto tem uma validade de 50 ciclos de esterilização. O produto deve ser descartado conforme a legislação vigente do país.

9. VALIDADE

O Abridor de Boca AF do Brasil tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.