

INSTRUÇÕES DE USO

ÁCIDO CONDAAF

Condicionador Ácido Fosfórico Gel 37%

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Ácido Condaaf 37% AF do BRASIL é um gel condicionador ácido fosfórico de viscosidade baixa, não escorrendo do local aplicado, possuindo também propriedade tixotrópica. Possui corante azul para facilitar a visualização e controle durante a aplicação. Produto hidrófilo por possuir uma boa afinidade com água, permitindo assim fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado.

2. APRESENTAÇÃO

1 seringa contendo 3g de ÁCIDO CONDAAF.

3. COMPOSIÇÃO

Ácido Fosfórico, Polietilenoglicol, Água Deionizada e Corante Azul de Metileno.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para a realização dos condicionamentos ácidos de esmalte e dentina proporcionando aumento de adesão e retenção dos sistemas adesivos sobre a superfície.

5. AÇÃO DO PRODUTO

ÁCIDO CONDAAF é um gel que contém Ácido Fosfórico na concentração de 37%, o qual reage com a superfície do esmalte ou dentina formando sais solúveis de Fosfato de Cálcio.

Estes Fosfatos solúveis são removidos e assim a superfície fica isenta de partículas soltas ou adsorvidas, apresentando-se como um relevo mais rugoso e também mais poroso (especialmente no caso da dentina, onde os túbulos dentinários são desobstruídos e expostos).

A limpeza associada às condições de rugosidade e porosidade são os fatores que permitem melhorar o comportamento dos adesivos da superfície condicionada. Com a superfície limpa e bem exposta, o adesivo penetra mais facilmente.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada. Proteger da incidência da luz solar direta.



ARMAZENAREM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

Promover a profilaxia, lavar e secar bem a região a ser condicionada.

Aplicar o Ácido CONDAAF na região a ser condicionada e deixe agir por 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina.

Dentes fluoretados podem necessitar de segunda aplicação.

Após o condicionamento, lavar a superfície com água em abundância e em seguida secar com jatos de ar suaves isentos de óleo.

8. CONTRA INDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Uso exclusivo do cirurgião dentista.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Evitar o contato com pele, tecidos orais e olhos, caso isso ocorra lave imediatamente com água corrente.

11. MANIPULAÇÃO

- Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;
- Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

12. INTERAÇÕES

Não há.