



INSTRUCCIONES DE USO

BLUEEVIDENCE

Azul de Metileno

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AF do Brasil presenta los Geles Reveladores de Placa y Fotosensibilizantes BlueEvidence 5 (0.005%) y BlueEvidence 10 (0.01%). Estos son geles a base de Azul de Metileno desarrollados para evidenciar la placa bacteriana, las infiltraciones y las microfracturas en las estructuras dentales. También actúan como agentes fotosensibilizantes en los procedimientos de Terapia Fotodinámica (TFD), promoviendo una descontaminación localizada segura y eficaz.

2. PRESENTACIÓN

- Caja Kit que contiene 10 jeringas de 1.0 mL cada una, acompañadas de 10 puntas aplicadoras.
- Caja o Flowpack que contiene 03 jeringas de 1.0 mL o 3.0 mL cada una, acompañadas de 03 puntas aplicadoras.
- Caja o Flowpack que contiene 01 jeringa de 1.0 mL o 3.0 mL, acompañada de 1 punta aplicadora.

3. COMPOSICIÓN

Azul de Metileno, Agua, Carbopol e Hidróxido de sodio.

4. INDICACIÓN DE USO

Indicado para evidenciar placa bacteriana, infiltraciones y fisuras en los dientes. También utilizado como fotosensibilizador en TFD para tratamientos periodontales, endodónticos, periimplantarios y lesiones mucosas.

5. CONSERVACIÓN / ALMACENAMIENTO



ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, FRESCO Y PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. TEMPERATURA RECOMENDADA: 15°C A 30°C.

6. INSTRUCCIONES DE USO

- Verifique la integridad de la jeringa.
- Acople la punta aplicadora en el momento de uso.
- Aplique el gel directamente sobre el área deseada.
- Espere 60 segundos, lave el sitio de aplicación con agua y observe si la coloración azul se destaca en las áreas previstas.
- Enjuague con agua después de su uso; el producto no debe permanecer después de la remoción de la placa o la corrección de las infiltraciones.

7. CONTRAINDICACIONES

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad al Azul de Metileno. No inyectar. No utilizar con agentes oxidantes fuertes.

8. ADVERTENCIAS

Uso exclusivo por cirujanos dentistas. Producto no estéril. Manipular con guantes y equipo de protección individual.

9. CUIDADOS ESPECIALES

Evitar el contacto con tejidos no objetivo. El producto puede manchar la ropa o los instrumentos. Deseche las jeringas usadas según la normativa local.

10. MANIPULACIÓN

Producto listo para usar. No diluir. Utilizar únicamente la punta aplicadora suministrada. No reutilizar.

11. VALIDEZ

Validez de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, respetando las condiciones de almacenamiento.