

## INSTRUÇÕES DE USO

# CUNHA ODONTOLÓGICA

## Cunha Odontológica de Madeira

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Cunhas Odontológicas AF do BRASIL são produzidas em madeira e coradas com pigmentos atóxicos. Elas garantem uma perfeita fixação das matrizes e não necessitam de recortes ou ajustes, resultando em restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno. Geometria simétrica e anatômica. Fácil manuseio com pinça e não mancham a restauração.

### 2. APRESENTAÇÃO

Cunhas de madeira contendo 100 unidades coloridas.

### 3. COMPOSIÇÃO

Madeira Natural e Colorida por corantes reativos atóxicos e não inflamáveis.

### 4. CONSERVAÇÃO I ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE(15 A 30C).

### 5. INSTRUÇÕES PARA USO

- Selecionar a cunha desejada.
- Inserir a cunha no espaço interproximal.
- Uma vez concluído o procedimento a cunha deve ser removida.

### 6. ADVERTÊNCIAS

- Uso profissional.
- Uso único.
- Sua reutilização pode causar contaminação cruzada.
- Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente.
- O produto possui uma extremidade pontiaguda e deve ser manuseado de forma a não causar lesão ao paciente.
- Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado.
- Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante.

### 7. INTERAÇÕES

Não há.