

## INSTRUÇÕES DE USO

# DESSENSIBILIZANTE DENTAL

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Dessensibilizante Dental 2% AF do BRASIL é um gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio, e possui uma ação dessensibilizante neural gerada pelo Nitrato de Potássio. O Nitrato de potássio vem sendo considerado um agente muito efetivo no tratamento da dentina hiperestésica. Sua ação se baseia no fato de que o aumento da concentração do potássio extracelular despolariza as membranas das fibras nervosas, bloqueando a passagem do estímulo, reduzindo a hipersensibilidade. Dever ser utilizado somente para uso profissional.

### 2. APRESENTAÇÃO

#### 1. Dessensibilizante Dental 2,0%

- Em seringas de polipropileno contendo 2g, 2,5g, 3g, 4g, 5g ou 10g.
- Em embalagens unitárias ou contendo 2 unid; 3 unid; 4 unid; ou 10 unid.

#### 2. Dessensibilizante Dental 0,2%

- Em seringas de polipropileno contendo 2g, 2,5g, 3g, 4g, 5g ou 10g.
- Em embalagens unitárias ou contendo 2 unid; 3 unid; 4 unid; ou 10 unid.

### 3. COMPOSIÇÃO

- Ingredientes Ativos: Nitrato de Potássio e Fluoreto de Sódio.
- Ingredientes Inativos: Água Deionizada, Glicerina, agente neutralizante e espessante.

### 4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado no tratamento de dentes com sensibilidades baixa, moderada e alta e foi desenvolvido para aliviar sensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos.

Também é indicado no tratamento de sensibilidade que pode ser causada pelo clareamento dental.

### 5. AÇÃO DO PRODUTO

É indicado para utilização antes, durante e depois do clareamento dental e quando a sensibilidade for significativa.

### 6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO



ARMAZENAREM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Limpe a superfície dos dentes eliminando placa, cálculo e outros depósitos que possam impedir a penetração do produto nos dentes;
- Aplique o gel dessensibilizante uniformemente sobre os dentes e aguarde um tempo mínimo de 10 minutos;
- Alternativamente o gel pode ser aplicado com auxílio da moldeira de clareamento fazendo a aplicação como se fosse o próprio clareador;
- Decorrido o tempo de aplicação, remova o gel dos dentes com algodão e água em abundância. Evite que o paciente degluta o dessensibilizante;
- Repita a aplicação do dessensibilizante conforme a necessidade ou no caso de clareamento dental acompanhando o tempo do tratamento. O número de aplicações não deve exceder uma vez ao dia.

Nota: Decorrido o tempo de aplicação do dessensibilizante e com este ainda sobre os dentes sugere-se friccionar o produto com microaplicador, escova ou discos de feltro em baixa rotação e movimentos circulares intermitentes (baixa pressão).

Este procedimento auxilia mecanicamente a penetração do agente dessensibilizante no dente melhorando assim sua performance.

### 8. CONTRA INDICAÇÕES

Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

### 9. ADVERTÊNCIAS

- Evite a ingestão proposital e excessiva do produto;
- Se ocorrer algum problema durante ou após a aplicação, comunique ao seu dentista;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem.

### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

Se um grande volume de produto for ingerido acidentalmente, procure ajuda médica.

### 11. MANIPULAÇÃO

Ambiente asséptico.

### 12. INTERAÇÕES

Não há.