

INSTRUÇÕES DE USO

EUCALIPTOL

Solvente de Gutta Percha

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Eucaliptol AF do BRASIL é obtido do óleo essencial de eucalipto. É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico e de sabor picante, seguida da sensação de frescura. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências. É um líquido que auxilia no retratamento de canais radiculares, agindo como solvente de cones de gutta percha.

2. APRESENTAÇÃO

1 frasco com 10ml de EUCALIPTOL.

3. COMPOSIÇÃO

EUCALIPTOL 100%.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado como solvente de cones de gutta percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares.

5. AÇÃO DO PRODUTO

Gutta Percha são cones obturadores de canais radiculares, destinados a ocupar o espaço elaborado pelos instrumentos.

A gutta percha é uma substância amorfa branca, flexível, pouco maleável a temperaturas inferiores a 50°C é solúvel no eucaliptol.

Solubilizando-se no eucaliptol, a gutta percha torna-se pastosa, sendo utilizadas na obturação do canal. Estas pastas endurecem coma volatilização dos solventes.

As obturações feitas com cones de gutta percha são facilmente removidas pelo uso do eucaliptol, xilol ou clorofórmio, que os dissolvem, com o auxílio da ação dos instrumentos.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO



ARMAZENAREM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Dispensar uma gota de Eucaliptol no conduto radicular;
- Aguardar em torno de 5 minutos para que ocorra o amolecimento do cone de gutta percha;
- Com o auxílio de uma lima endodôntica instrumentar e retirar a gutta percha;

- Dispensar mais uma gota de Eucaliptol quando perceber que o cone de gutta percha remanescente estiver seco ou quebradiço;
- Repetir a operação até completar a remoção.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Não há contra indicações;
- Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Evitar o contato com a pele e olhos;
- Não ingerir;
- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Evitar o contato com a pele e os olhos;
- Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

11. INTERAÇÕES

Não há.

