

## INSTRUÇÕES DE USO

# EUGENOL

## Material Restaurador Provisório

### 1. DESCRIÇÃO DOPRODUTO

O Eugenol AF do BRASIL é um derivado fenólico conhecido como óleo de cravo. Tem grande emprego na odontologia devido as suas qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizante. É também eficaz na eliminação de bactérias presentes na boca. Seus efeitos são completos e dependem da concentração de Eugenol livre sobre o local onde é exposto.

### 2. APRESENTAÇÃO

1 frasco contendo 20ml de Eugenol.

### 3. COMPOSIÇÃO

Eugenol (99 a 100%) 100%.

### 4. INDICAÇÃO DE USO

Utilizado juntamente como Óxido de Zinco, é indicado como:

- Agente de obturação provisória;
- Forramento cavitário, em cavidades profundas;
- Agente para cimentação provisória ou permanente;
- Agente para obturação decanais radiculares, como cimento cirúrgico.

### 5. AÇÃO DO PRODUTO

O Eugenol em baixas concentrações apresenta:

- Efeito sedativo, por inibir a atividade nervosa de forma reversível, como um anestésico local;
- Efeito anti-inflamatório, por inibir as quimiotaxias dos neutrófilos e a geração de anion superóxido;
- Efeito bactericida, por estabilizar as membranas celulares, o que previne a penetração das bactérias nos duetos dentinários.

### 6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Gotejar Eugenol sobre uma placa;
- Dispensar o Óxido de Zinco sobre a placa e dividir em quatro partes;
- Juntar o pó ao líquido, por partes, utilizando uma área ampla da placa;
- Espatular até obter uma massa homogênea e lisa;

- Prosseguir até conseguir a consistência desejada.

### 8. CONTRA INDICAÇÕES

- Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto;
- Não deve ser utilizado em gestantes;
- Pode ocorrer sensação picante ou de queimadura quando em contato com a mucosa;
- Pode provocar irritação na pele;
- Pode provocar distúrbios gástricos quando utilizado o cimento cirúrgico por várias semanas.

### 9. ADVERTÊNCIAS

- Evitar o contato com a pele e olhos;
- Não ingerir;
- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções.

### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos;
- Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

### 11. MANIPULAÇÃO

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

### 12. INTERAÇÕES

Os vapores do Eugenol podem alterar as propriedades químicas e físicas de cimentos (de silicato e ionômero de vidro) e resinas. Armazenar o Eugenol em local separado destes materiais.