

INSTRUÇÕES DE USO

MATRIZ DE AÇO INOX SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS KIT SORTIDO

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit de Matriz de aço inox seccionais pré-formadas AF do BRASIL para utilização em restaurações, sua facilidade e agilidade devido estarem pré-cortadas reduz o tempo operatório, possuindo uma boa adaptação e proporcionando mais conforto ao paciente.

2. APRESENTAÇÃO

Kit Sortido de Matriz de aço inox seccionais pré-formadas:

- 02 Grampos de Fixação;
- 08 Protetores de Silicone;
- 80 Matrizes Sortidas P, M, G e GG.

3. COMPOSIÇÃO

Aço inoxidável e Silicone.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para uso odontológico para auxílio em restaurações classe II.

5. AÇÃO DO PRODUTO

Matriz de aço inox seccionais pré-formadas possibilita uma melhor anatomia natural do dente após o procedimento.

6. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Armazenar o Produto em local fresco seco a temperatura inferior a 60°C. A umidade deve ser inferior a 95% UR

7. INSTRUÇÕES PARA USO

Ao iniciar o procedimento, verificar o tamanho da matriz de aço inox seccionais pré-formadas (P, M, G e GG) que melhor se adapta à cavidade a ser restaurada.

Colocar a matriz na superfície proximal a ser restaurada, em seguida a cunha e após o grampo de fixação com os protetores de silicone.

Obs.: O uso ou não do grampo e dos protetores de silicone e a forma da sua instalação dependem de preferências pessoais do usuário e da situação clínica. Realizar o processo de restauração. Assim que concluído, remover o grampo, depois a cunha e finalmente a matriz.

8. CONTRA INDICAÇÕES

Não há.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não ingerir;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso Odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Esterilizar antes do uso.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Uso profissional, uso único, não estéril, descartar após o uso.

11. MANIPULAÇÃO

Ambiente asséptico

12. INTERAÇÕES

Não há.