

INSTRUÇÕES DE USO

MOLDEIRAS DUPLA DESCARTÁVEIS

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Moldeiras Duplas Descartáveis AF do BRASIL são confeccionadas em poliestireno branco e espuma de poliuretano de excelente qualidade. Possuem um encaixe universal, precisão na aplicação e na manipulação.

2. APRESENTAÇÃO

Pacote contendo 24, 50 ou 100 unidade;

Disponíveis nos seguinte modelos :

- Moldeira Dupla Descartável Tamanho P ;
- Moldeira Dupla Descartável Tamanho M;
- Moldeira Dupla Descartável Tamanho G;
- Moldeira Dupla Descartável Tamanho MISTA.

3. COMPOSIÇÃO

Poliestireno Branco e Espuma de Poliuretano.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicada para aplicação de flúor

5. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local fresco, limpo, seco e sem incidência direta de irradiação solar.

6. INSTRUÇÕES PARA USO

- Secar as superfícies dentais;
- Colocar o gel fluoretado na face onde há a espuma da moldeira;
- Introduzir as Moldeiras Duplas Descartáveis AF do BRASIL na boca do paciente, de forma que a espuma com flúor fique em contato com os dentes;
- Pedir para que o paciente morda suavemente a moldeira para melhor ajuste aos dentes;
- Deixar o flúor em contato com os dentes de acordo com instruções de uso do flúor em gel;
- Retirar a moldeira e remover o excesso de gel.

7. CONTRA INDICAÇÕES

Não utilizar em pacientes com alguma sensibilidade ao componentes.

8. ADVERTÊNCIAS

Verifique sempre se o produtos está em perfeito estado e não contem defeitos;

9. CUIDADOS ESPECIAIS

Não se aplica.

10. VALIDADE

As Moldeiras Duplas Descartáveis AF do BRASIL tem validade de 05 anos, após a data de fabricação.