

INSTRUÇÕES DE USO

ÓLEO DE LARANJA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Óleo de Laranja AF do BRASIL é utilizado no tratamento endodôntico auxiliando na desobstrução de canais radiculares, sendo um óleo essencial extraído de casca da laranja doce tem um odor agradável e é biocompatível, não apresentando efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde.

2. APRESENTAÇÃO

1 frasco com 10ml de óleo de Laranja.

3. COMPOSIÇÃO

Óleo de Laranja (Terpenode Laranja).

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para o tratamento endodôntico como solvente de Guta-Percha e dos cimentos obturadores, auxiliando na desobstrução de canais radiculares.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O óleo de Laranja é um solvente químico extraído da casca da laranja doce, é volátil e possui como principal característica não ser tóxico ao profissional, paciente e meio ambiente.

Na odontologia é utilizado como solvente de Guta-Percha e cimentos obturadores, além de ser eficaz na desobstrução de canal radicular obturado com cimento de óxido de zinco + eugenol.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO



ARMAZENAREM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO EM ENDODONTIA:

- Retirar a restauração por método mecânico até a entrada do canal radicular; Dispensar 1 a 2 gotas de Óleo de Laranja na entrada do canal radicular e aguardar de 5 a 10 minutos;
- Após o tempo de ação, com o auxílio de uma lima endodôntica ou por meio de alargadores, realizar leves movimentos de penetração e introduzir o instrumento no interior do cimento efetuando a remoção;
- Dispensar o Óleo de Laranja na medida necessária;
- Ao término da remoção do material obturador, irrigar o canal com solução tensoativa.

8. CONTRA INDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Uso exclusivo do cirurgião dentista.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Evitar inalação excessiva de vapores concentrados;
- Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

11. MANIPULAÇÃO

- Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;
- Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

12. INTERAÇÕES

Não há.