

INSTRUÇÕES DE USO

ÓXIDO DE ZINCO

Material Restaurador Provisório

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Óxido de Zinco AF do BRASIL é um pó fino, branco ou branco-amarelado, leve, inodoro, insípido, isento de partículas ásperas. O seu emprego na odontologia é geralmente associado ao Eugenol, e é utilizado basicamente como material temporário de fechamento de cavidades, bem como fechamento de câmaras pulpares nos procedimentos endodônticos.

2. APRESENTAÇÃO

1 Frasco com 50g de ÓXIDO DE ZINCO.

3. COMPOSIÇÃO

ÓXIDO DE ZINCO (99 A 100%) 100%.

4. INDICAÇÃO DE USO

- Agente de Obturação provisório;
- Forramento cavitário, em cavidades profundas;
- Agente para cimentação provisório ou permanente;
- Agente para obturação de canais radiculares como cimento cirúrgico.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O ÓXIDO DE ZINCO e o Eugenol misturados e espatulados formam um cimento que pode ser utilizado como bases terapêuticas de restaurações temporárias e na obturação de condutos radiculares.

O cimento tem pH 7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. Esta é uma das razões pelas quais é um dos materiais menos irritantes de todos os usados em Odontologia. Além disso possui também algumas propriedades anti-sépticas e sedativos devido ao Eugenol.

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Dispensar o Óxido de Zinco sobre uma placa de dividir em quatro partes;
- Gotejar sobre a placa a quantidade necessária de Eugenol;
- Juntar o pó ao líquido, por partes, utilizando uma área ampla da placa;
- Após adicionar cada porção do pó, espatular até obter uma massa homogênea e lisa. Prosseguir até conseguir a

consistência correta (pasta consistente para restaurações provisórias e cimentos cirúrgicos, pasta cremosa para cavidades profundas, cimentação e obtenção de canais radiculares).

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Não há contra indicações;
- Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não ingerir;
- Não utilizar se o lacre estiver violado;
- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Aplicar o produto usando luvas, máscara e óculos de proteção.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos;
- Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção.

11. MANIPULAÇÃO

- O Óxido de Zinco é lentamente umedecido pelo Eugenol, e assim se exige espatulação vigorosa e prolongada, especialmente para as misturas mais espessas. Uma relação pó/ líquido de 3:1 ou 4:1 deve ser usada para obter resistência máxima;
- Após o uso manter a embalagem bem fechada.

12. INTERAÇÕES

Não há.