

## INSTRUÇÕES DE USO

# PAPEL CARBONO

## Papel Carbone para Articulação

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Papel Carbone AF do BRASIL dupla face em forma de tira nas cores azul e vermelho. Recoberto com uma camada fina de parafina possui uma resistência à umidade e tração.

### 2. APRESENTAÇÃO

Bloco de 12 folhas com lâminas de papel carbono para articulação em forma de tira ou em forma de ferradura para arcada total, dupla face nas cores azul/azul, azul/vermelho.

### 3. COMPOSIÇÃO

Papéis especiais; Ceras Vegetais; Pigmentos; Óleos Vegetais; Parafina e Vaselina.

### 4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais.

### 5. AÇÃO DO PRODUTO

O PAPEL CARBONO é utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais.

### 6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Faça a introdução do PAPEL CARBONO AAF do BRASIL na boca do paciente ou no modelo de gesso;
- Pedir ao paciente ocluir para marcação dos pontos de contato oclusais;
- Faça ajustes com instrumentos adequados se preciso.

**IMPORTANTE:** Para obtenção de um melhor resultado do produto, secar as superfícies dentais para permitir que a tinta do papel carbono marque os pontos de contato de forma nítida e sem borrões.

### 8. CONTRAINDICAÇÕES

O produto não apresenta contra indicações.

### 9. ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Aplicar o produto usando luvas, máscara e óculos de proteção;
- Não ingerir;
- Utilizar somente uma vez.

### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

Não há.

### 11. MANIPULAÇÃO

Após o uso manter o bloco do produto protegido da luz, calor e umidade.

### 12. INTERAÇÕES

Não há.