

INSTRUÇÕES DE USO

PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pasta de Polimento Diamantada AF do BRASIL é universal com diamante micronizado de granulação extra fina (2 a 4 microns), para uso exclusivo de dentistas ou protéticos. Oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Solúvel em água, e por isto proporciona facilidade na lubrificação do processo de polimento e na remoção da pasta no final do tratamento. É um produto uniforme, de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade ideal para trabalho do profissional.

2. APRESENTAÇÃO

- Em seringa de polipropileno contendo 2g, 2,5g, 3g, 4g, 5g ou 10g.
- Em embalagens unitárias ou contendo 2 unid; 3 unid; 5 unid; ou 10 unid.

3. COMPOSIÇÃO

Carbômero, Glicerina Vegetal Bidestilada, Hidróxido de Sódio e Água Deionizada.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores.

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta.



ARMAZENEM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

Prepare a região a ser polida deixando-a lisa e no formato final desejado. Se necessário, utilize discos de lixa ou pasta de granulação média para acabamento prévio ao polimento. Esta etapa é de fundamental importância, pois a obtenção de brilho tem forte dependência da condição inicial da superfície. Deposite uma pequena quantidade de pasta sobre um disco de feltro ou diretamente sobre a superfície da peça e proceda o polimento. Repita os procedimentos, se necessário, até obter o efeito desejado.

Notas:

1. Utilize baixa rotação e movimentos intermitentes com baixa pressão de aplicação do feltro sobre o dente. Desta forma previne-se o aquecimento da superfície.
2. Utilize sempre feltros novos para executar um polimento. A contaminação de feltros com abrasivos de outras pastas pode comprometer o sucesso do polimento.

8. CONTRA INDICAÇÕES

Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

9. ADVERTÊNCIAS

Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, evitando-se assim o aquecimento excessivo da superfície dental.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional

11. MANIPULAÇÃO

Ambiente asséptico

12. INTERAÇÕES

Não há.