

## INSTRUÇÕES DE USO

# PASTA PROFILÁTICA

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Pasta Profilática AF do BRASIL possui sabores refrescantes e contém flúor, abrasivos adequadamente dosados, promovendo assim maior proteção contra cárie nos procedimentos de profilaxia e um polimento de qualidade.

### 2. APRESENTAÇÃO

- Tubo de Pasta Profilática 90 gr no sabor tutti-frutti;
- Tubo de Pasta Profilática 90 gr no sabor menta;
- Tubo de Pasta Profilática 90 gr no sabor hortelã (spearmint).

### 3. COMPOSIÇÃO

Água, fluoreto de sódio, carboximetilcelulose, sorbitol, lauril sulfato de sódio, sílica, carbonato de cálcio, quartzo, metil parabeno, sacarina sódica, glicerina vegetal e aroma.

### 4. INDICAÇÃO DE USO

É indicada para procedimentos de profilaxia, limpeza, na remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.

### 5. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar o Produto em local fresco seco e a temperatura de 5°C a 30°C.

### 6. INSTRUÇÕES PARA USO

1. Remover da bisnaga e colocar em um pote dappen AF do BRASIL limpo a quantidade necessária de pasta para uma profilaxia. Fechar imediatamente a bisnaga após a remoção do material, afim de evitar a alteração na consistência do produto.
2. Com um motor de baixa rotação, dirigir a taça de borracha (ou escova de robinson) AF do BRASIL contra a superfície da pasta até preenchê-la.
3. Iniciar a profilaxia por vestibular e lingual, evitando pressão excessiva e mantendo a taça de borracha em ângulo de 90° com relação à superfície do dente.
4. Para oclusal, recomenda-se o uso de escova de Robinson para sulcos profundos, tomando cuidado para não ferir as margens gengivais. Nos locais de difícil acesso, como nas faces proximais, recomenda-se o uso de fio ou fita dental impregnados com pequenas quantidades de pasta.
5. Observações: Durante a limpeza e o polimento, a taça (ou escova de robinson) deve conter sempre a pasta, para evitar aquecimento excessivo do dente. O controle da salivação deve ser feito para evitar a diluição da pasta e sua deglutição.

### 7. CONTRA INDICAÇÕES

Não há contra indicações, entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos componentes da composição, recomenda-se não fazer o uso.

### 8. ADVERTÊNCIAS

Produto para uso de Profissional de Odontologia;

Evitar a ingestão do produto pois pode ocasionar náuseas, caso aconteça realizar grande ingestão de água.

### 9. CUIDADOS ESPECIAIS

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA/ABERTA OU FORA DO VENCIMENTO.

### 10. VALIDADE

A PASTA PROFILÁTICA AF DO BRASIL TEM VALIDADE DE 2 ANOS, APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.