

## INSTRUÇÕES DE USO

# PEDRA POMES

## Pedra Pomes Extra Fina

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Pedra Pomes AF do BRASIL é um pó abrasivo extra fino, utilizado para limpeza e polimento dos dentes e de restaurações metálicas e próteses. O produto é usado como um abrasivo e empregado na limpeza e no polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

### 2. APRESENTAÇÃO

1 Frasco com 100g de PEDRA POMES.

### 3. COMPOSIÇÃO

PEDRA POMES.

### 4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

### 5. AÇÃO DO PRODUTO

A Pedra Pomes é um material abrasivo, que promove a remoção de placas bacterianas externas e manchas superficiais.

### 6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

Aplicar o produto no dente, puro ou com água, com auxílio de taças de borracha.

### 8. CONTRAINDICAÇÕES

Não há contraindicações.

### 9. ADVERTÊNCIAS

- Não ingerir;
- Não utilizar se o lacre estiver violado;
- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças; Somente para uso odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Aplicar o produto usando luvas, máscara e óculos de proteção;
- Evitar a inalação e o contato com pele e os olhos.

### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos. Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção.

### 11. MANIPULAÇÃO

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

### 12. INTERAÇÕES

Não há.

