

INSTRUÇÕES DE USO

RETRAF

Fio Retrator Gingival

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Retraf AF do BRASIL é um fio retrator gengival confeccionado em fio de algodão trançado 100%. Devido sua composição possui uma boa absorção, possuem também uma ótima pressão elástica sobre a margem gengival, afastando adequadamente o tecido no sulco e auxiliando o profissional em seus procedimentos.

2. APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 250 cm de RETRAF.

Possuem 5 Modelos:

- 000 - Ultra Extra Fino _ Preto.
- 00 - Extra Fino _ Amarelo.
- 0 - Fino _ Lilás.
- 1 - Médio _ Azul.
- 2 - Grosso _ Verde.
- 3 - Extra Grosso _ Vermelho.

3. COMPOSIÇÃO

Fio de algodão 100% trançado.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para retrair a gengiva em vários procedimentos dentais, facilita a manipulação de infusões dentárias, o acesso e a visibilidade de todo o tecido gengival, além de ajudar a prevenir danos no tecido gengival durante a confecção dos preparos cavitários.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O fio retrator gengival RETRAF produz uma ação mecânica, fazendo uma interposição gengival/superfície dentária. Com a umidade normal do tecido, água e/ou solução para retração gengival faz com que o fio retrator trançado promova a retração do tecido gengival.

6. INSTRUÇÕES PARA USO

- Cortar um pedaço de Fio no comprimento desejado;
- Obs: O fio poderá ou não ser embebido em solução hemostática/retratora para obter uma maior retração;
- Posicionar o fio ao redor do colo do dente, e introduzir no sulco comprimindo com cuidado utilizando uma espátula sem a extremidade cortante. (Iniciar pelo espaço interproximal onde o sulco geralmente é mais profundo e então proceder a volta completa do dente no sentido horário);
 - Se necessário, para facilitar a remoção, umedecer ligeiramente o fio retrator com água.

Obs: Não retirar o fio imediatamente antes da tomada da impressão.

7. TEMPO IDEAL DE PERMANÊNCIA DO PRODUTO

- Não utilizando solução hemostática/retratora, o tempo ideal de permanência do produto para a obtenção da retração é de pelo menos 5 minutos;
- Quando utilizar solução hemostática/retratora, seguir o tempo indicado nas instruções de uso do fabricante da solução;
- Em moldagens, deixar o fio posicionado até imediatamente antes da tomada da impressão.

8. ADVERTENCIAS

- Não ingerir;
- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Utilize o produto somente sobre gengiva sadia;
- Utilize o produto conforme indicado nas Instruções de uso;
- Produto de uso exclusivamente profissional.

9. PRECAUÇÕES

- Utilizar em tecidos saudáveis;
- A impregnação de solução hemostática de se levar em consideração as instruções do fabricante da solução utilizada;
- Após a utilização do fio retrator gengival RETRAF verificar e inspecionar cuidadosamente para verificar se não ficou nenhum fragmento do fio retrator gengival;
- Descartar após o uso.

10. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE



ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO E SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15° A 30°C).

- A umidade deve ser mantida numa faixa entre 35% UR e 70% UR;
- Não requer condições especiais de transporte. Transportar na embalagem original do produto.

11. CONTRAINDICAÇÕES

É contraindicado para pessoas que possuam sensibilidade à algodão.