

INSTRUÇÕES DE USO

TIRAS MATRIZ DE POLIÉSTER

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Tira Matriz de Poliéster AF do BRASIL produzido em 100% poliéster de alta qualidade e super flexível.

2. APRESENTAÇÃO

- Envelope Contendo Tiras Matriz de Poliéster no modelo;
- Tira Matriz de Poliéster 10mmx120mmx0,05mm contendo 50 unidades.

3. COMPOSIÇÃO

- Poliéster não Inflamável e atóxico.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para ser posicionado entre os dentes para promover uma separação entre eles evitando assim que o material restaurador seja depositado no dente ao lado, podendo também ser utilizado como conformador para dar contorno as restaurações.

5. AÇÃO DO PRODUTO

A finalidade da Tiras Matriz de Poliéster é atuar como uma barreira física para o material restaurador.

6. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Cortar a fita no tamanho desejado;
- Introduzir a fita no porta-matriz;
- Inserir e ajustar o conjunto ao dente a ser restaurado;
- Ajustar a matriz ao dente;
- Inserir a cunha anatômica na amêia e realizar o procedimento restaurador;
- Após concluída a restauração remover a cunha e a fita.

8. CONTRA INDICAÇÕES

N/A

9. ADVERTÊNCIAS

- Não ingerir;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso profissional;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Uso único
- Quando houver alergia ao componente suspender seu uso.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Mantem o produto na embalagem original até o momento do uso.

11. MANIPULAÇÃO

Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas, máscara e óculos de proteção.

12. INTERAÇÕES

Não há.

