

INSTRUÇÕES DE USO

TIRAS ABRASIVAS DE AÇO

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Tiras Abrasivas de Aço AF do BRASIL são produzidas em Aço Inox e desenvolvidas e destinadas ao uso odontológico profissional, não quebra e possui muita flexibilidade. Possuem um espetacular diferencial que é seu CENTRO NEUTRO, sem abrasivo, facilitando a introdução nas superfícies Interproximais dos dentes, trazendo maior precisão e conforto ao paciente.

2. APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 12 unidade ou Pacote contendo 100 unidades;

Disponíveis nos seguinte modelos :

- Tiras Abrasivas de Aço 4mm x 140mm;
- Tiras Abrasivas de Aço 6mm x 140mm;

3. COMPOSIÇÃO

Aço Inox e Óxido de Alumínio.

4. INDICAÇÃO DE USO

É Indicado para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amalgamas.

5. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local fresco, limpo, seco e sem incidência direta de irradiação solar.

6. INSTRUÇÕES PARA USO

- Levantar com cuidado as tiras até as superfícies proximais da restauração;
- Através do Centro Neutro introduzir nos espaços interproximal do dente;
- Após iniciar o destgaste da região tratada.

7. CONTRA INDICAÇÕES

Não utilizar em pacientes com alguma sensibilidade ao componentes.

8. ADVERTÊNCIAS

Verifique sempre se o produtos está em perfeito estado e não contem defeitos;

9. 9. CUIDADOS ESPECIAIS

Não se aplica.

10. 10. VALIDADE

As Tiras Abrasivas de Aço AF do BRASIL tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.