

INSTRUÇÕES DE USO

TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Tiras Abrasivas de Poliéster AF do BRASIL são produzidas em 100% poliéster e abrasivos em óxido de alumínio, desenvolvidas e destinadas ao uso odontológico profissional, possui 2 (duas) granulações, média (branca) e grossa (cinza). As tiras possuem um Centro Neutro, sem abrasivo, facilitando a introdução nas superfícies Interproximais dos dentes.

2. APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 50 ou 150 unidade;

Disponíveis nos seguinte modelos:

- Tira Abrasiva de Poliéster 2mm x 170mm;
- Tira Abrasiva de Poliéster 4mm x 170mm.

3. COMPOSIÇÃO

Poliéster e Óxido de Alumínio.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para acabamento das faces proximais de restaurações em resinas.

5. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

6. INSTRUÇÕES PARA USO

A tira deve ser segura pelas polpas dos dedos polegar e indicador, após penetrar no espaço interdental, pelo Centro Neutro deve ser movimentada de vestibular para lingual e vice-versa, da região da junção servical em direção à face oclusal do dente.

7. CONTRA INDICAÇÕES

Não utilizar em pacientes com alguma sensibilidade ao componentes.

8. ADVERTÊNCIAS

Verifique sempre se o produtos está em perfeito estado e não contem defeitos;

9. CUIDADOS ESPECIAIS

Não se aplica.

10. VALIDADE

As Tiras Abrasivas de Poliéster AF do BRASIL tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.