

INSTRUÇÕES DE USO

VIPLAK DUO Blue and Pink

Evidenciador de Placas

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O VIPLAK DUO Blue and Pink AF do BRASIL é utilizado para evidenciar a presença de placas bacterianas, com o auxílio de duas pigmentações para indicar placa antiga e placa nova.

2. APRESENTAÇÃO

1 frasco com 5ml, 10ml, 15ml, 20 ml, 30 ml, 50ml ou 1.000 ml.

3. COMPOSIÇÃO

Pigmento Azul Brilhante, Pigmento Vermelho Eritrosina, Metilparabeno, Propilparabeno, Aroma Tutti Frutti e Água Deionizada.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para evidenciar placa bacteriana com dois indicadores cromáticos para colorir placa antiga (azul) e placa nova (rosa).

5. AÇÃO DO PRODUTO

O VIPLAK DUO Blue and Pink AF do BRASIL tem um maior poder de corar placa bacteriana, nos dentes aparentemente limpos, possuindo duas cores que contraste com os dentes e possibilitam a verificação de placas antigas e placas novas. Este artifício não só facilita a localização de placa, favorecendo também a instrução de higienização bucal.

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO EM ENDODONTIA

1. Aplicar de 4 a 5 gotas na boca do paciente, após isto pedir o mesmo espalhar sobre os dentes com a língua, e deixar atuar por aproximadamente 10 a 15 segundos.
2. Solicite ao paciente que enxague a boca até a água não sair tingida. Todas as superfícies dentárias onde houver placa bacteriana antiga ficarão tingidas de azul e onde houver placa recente, de rosa.
3. Realizar a profilaxia, como também instruir o paciente a técnica de escovação, para eliminação da placa até não haver mais pigmentação nos dentes azuis ou rosa.
4. Aplicar novamente o VIPLAK DUO Blue and Pink AF do BRASIL. Se a profilaxia ou a escovação tiver sido perfeita, não haverá nenhuma superfície dentária colorida.

8. CONTRA INDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar comprazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Não ingerir, caso ocorra, procurado um médico com a bula em mãos;
- Utilizar EPIs (Máscaras, Óculso e Luvas);
- Uso exclusivo do cirurgião dentista.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Evitar inalação excessiva de vapores concentrados. Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

11. MANIPULAÇÃO

- Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;
- Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

12. INTERAÇÕES

Não há.