

INSTRUÇÕES DE USO

VIPLAK

Evidenciador de Placas

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Viplak AF do BRASIL é utilizado para evidenciar a presença de placas bacterianas com uma coloração avermelhada. Composto por fucsina básica tem um maior poder de corar e revelar a placa bacteriana nos dentes, mesmo em dentes aparentemente limpos. Devido sua ação de revelação o Viplak favorece a instrução de higienização bucal.

2. APRESENTAÇÃO

1 frasco com 10ml de VIPLAK.

3. COMPOSIÇÃO

Fucsina Básica; Álcool Etilíco e Água Deionizada.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para evidenciar placa bacteriana.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O VIPLAK confere ao produto um maior poder de corar placa bacteriana, nos dentes aparentemente limpos, de uma cor que contraste com os dentes. Este artifício não só facilita a localização de placa, favorecendo também a instrução de higienização bucal.

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO EM ENDODONTIA

1. Aplicação tópica:

- Umedecer o cotonete ou bolinha de algodão com VIPLAK e aplicar em todas as superfícies dentais;
- Depois fazer um bochecho com água para retirar o excesso.

2. Bochecho:

- Colocar em um copo aproximadamente 6ml de água, adicionar 1ml (aproximadamente 16 gotas) de VIPLAK, bochechar durante 1 minuto e dispensar; Depois fazer bochecho com água para retirar os excessos.

OBSERVAÇÃO:

- Todas as áreas que ficarem coradas identificam a presença de placa bacteriana, devendo ser removida pelo uso da escova dental e fio dental.
- VIPLAK pode ser utilizado diariamente, preferencialmente na última escovação dentária.

8. CONTRA INDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Uso exclusivo do cirurgião dentista.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Evitar inalação excessiva de vapores concentrados. Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

11. MANIPULAÇÃO

- Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;
- Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

12. INTERAÇÕES

Não há.